

SCHEDA INFORMATIVA SULLE MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO

RevI del 24/10/2013

Parte I – MATRICE CHERATINICA (capello, pelo pubico, pelo ascellare, pelo toracico)



1. Circondare la zona di campionamento (è preferibile la zona nucale)



2. Arrotolare una ciocca del diametro di circa 0.5 cm. Si raccomanda di prelevare due ciocche per ogni analisi richiesta (EtG e droghe) in modo da garantire sufficiente campione per eventuali controanalisi



3. Tagliare la ciocca posizionando le forbici radenti il cuoio capelluto, avendo cura di prelevare una ciocca per ogni classe di sostanze da determinare



4. Identificare con sistema idoneo la base della ciocca, ponendo attenzione a non muovere le formazioni pilifere dalla loro sede



5. Riporre la ciocca in contenitore asciutto



6. Identificare il contenitore



7. Riportare sul documento di campionamento colore del capello ed eventuali trattamenti cosmetici

8. In caso di analisi segmentale, identificare chiaramente la finestra diagnostica richiesta

9. Conservare il campione in luogo fresco e asciutto



Form for medical professional and laboratory worker information. It includes fields for the medical professional's name, date, and signature, and the laboratory worker's name and signature. A barcode and the number 08U002458 are also present.

1. Compilare i sigilli con pennarello indelebile riportando le informazioni necessarie



Form for medical professional and laboratory worker information, showing multiple copies. It includes fields for the medical professional's name, date, and signature, and the laboratory worker's name and signature. A barcode and the number 08U002458 are also present.



2. Effettuare il prelievo (min. 60 mL) utilizzando il contenitore di prima raccolta



3. Versare almeno 20 mL in ognuno dei due flaconi (B e C) avendo cura di conservare nel contenitore di prima raccolta i restanti 20 mL

COME SIGILLARE I CONTENITORI



COME SIGILLARE LE BORSE DI TRASPORTO

